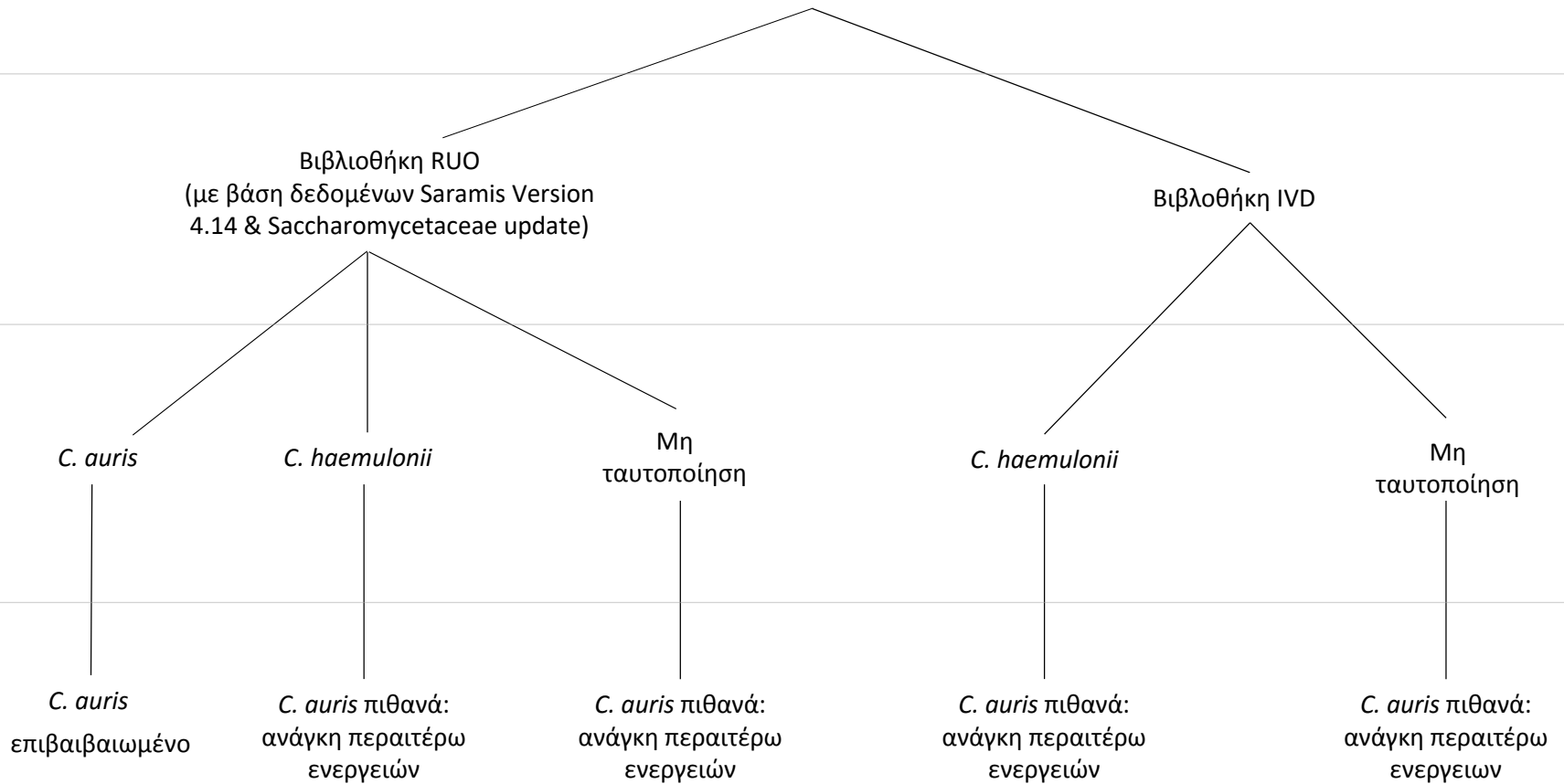


Bruker Biotyper  
MALDI-TOFΒιβλιοθήκη RUO  
(έκδοση 2014 [5627]  
και πιο πρόσφατες)Βιβλιοθήκη συστήματος  
CA (έκδοση Claim 4)*C. auris**C. auris**C. auris*  
επιβεβαιωμένο  
αποτέλεσμα*C. auris*  
επιβεβαιωμένο  
αποτέλεσμα***C. auris* επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα:**

Εφαρμογή μέτρων προφύλαξης επαφών, ενημέρωση ΕΟΔΥ, αποστολή στελέχους στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Αθηνών.

# bioMérieux VITEK MS MALDI-TOF



### ***C. auris* επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα:**

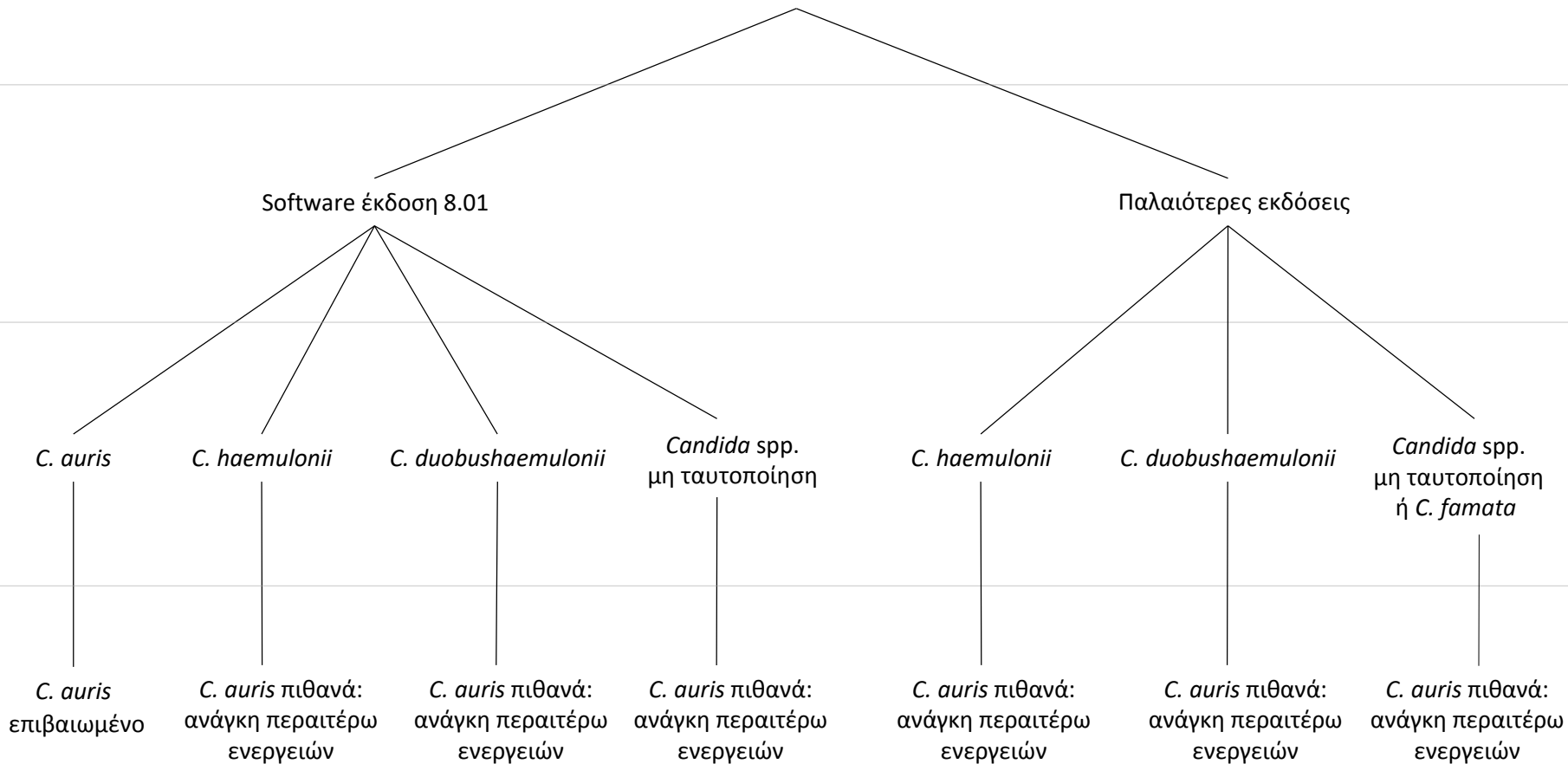
Εφαρμογή μέτρων προφύλαξης επαφών, ενημέρωση ΕΟΔΥ, αποστολή στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Αθηνών.

### ***C. auris* πιθανό αποτέλεσμα:**

**Ανάγκη περαιτέρω ενεργειών για επιβεβαίωση *C. auris*. Αποστολή στελέχους στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Αθηνών.**

Εφαρμογή μέτρων προφύλαξης επαφών, ενημέρωση ΕΟΔΥ.

## VITEK 2 YST (bioMérieux)

***C. auris* επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα:**

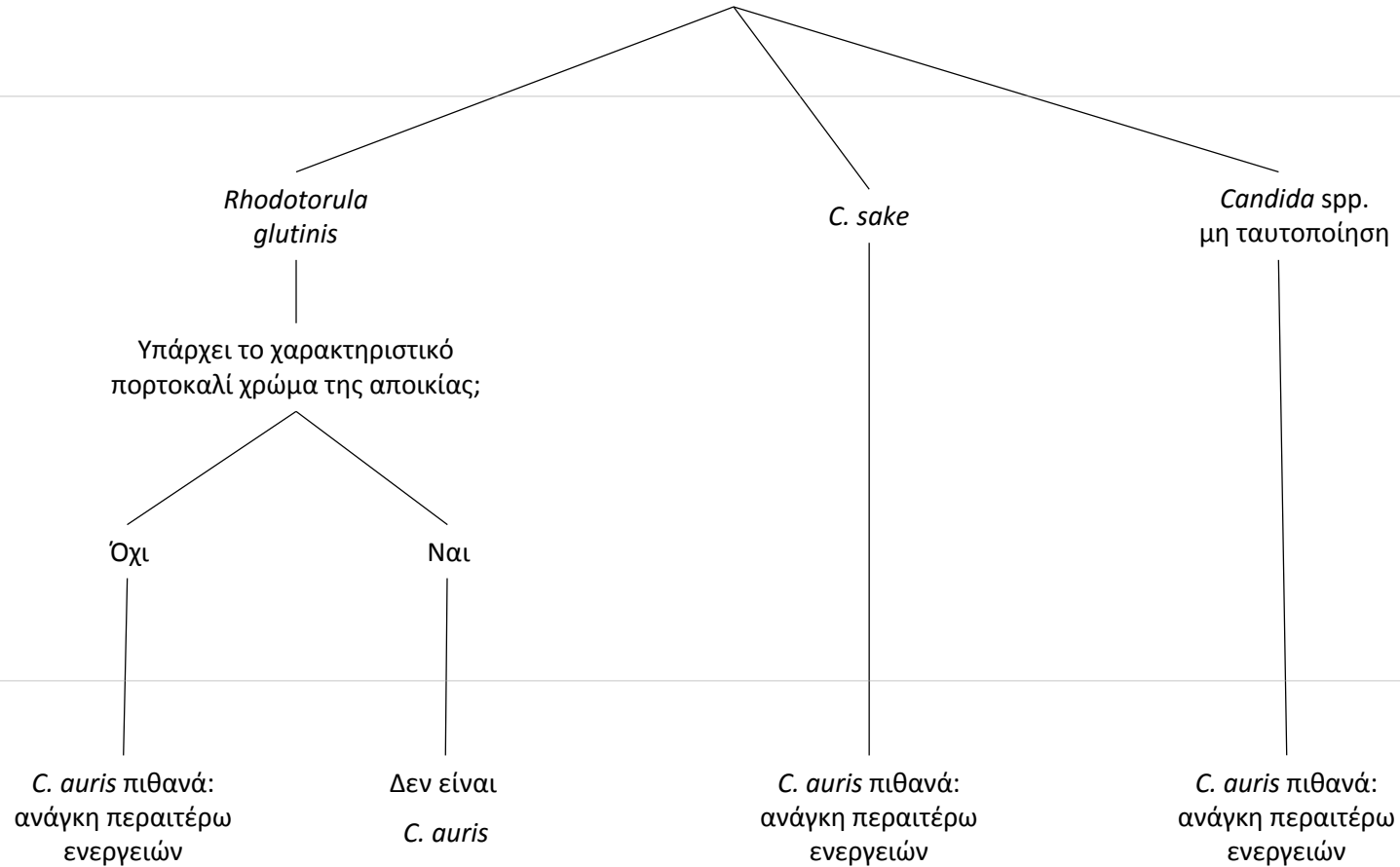
Εφαρμογή μέτρων προφύλαξης επαφών, ενημέρωση ΕΟΔΥ, αποστολή στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Αθηνών.

***C. auris* πιθανό αποτέλεσμα:**

Ανάγκη περαιτέρω ενεργειών για επιβεβαίωση *C. auris*. Αποστολή στελέχους στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Αθηνών.

Εφαρμογή μέτρων προφύλαξης επαφών, ενημέρωση ΕΟΔΥ.

## API 20C (bioMérieux)

**C. auris πιθανό αποτέλεσμα:**

Ανάγκη περαιτέρω ενεργειών για επιβεβαίωση *C. auris*. Αποστολή στελέχους στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Αθηνών. Εφαρμογή μέτρων προφύλαξης επαφών, ενημέρωση ΕΟΔΥ.

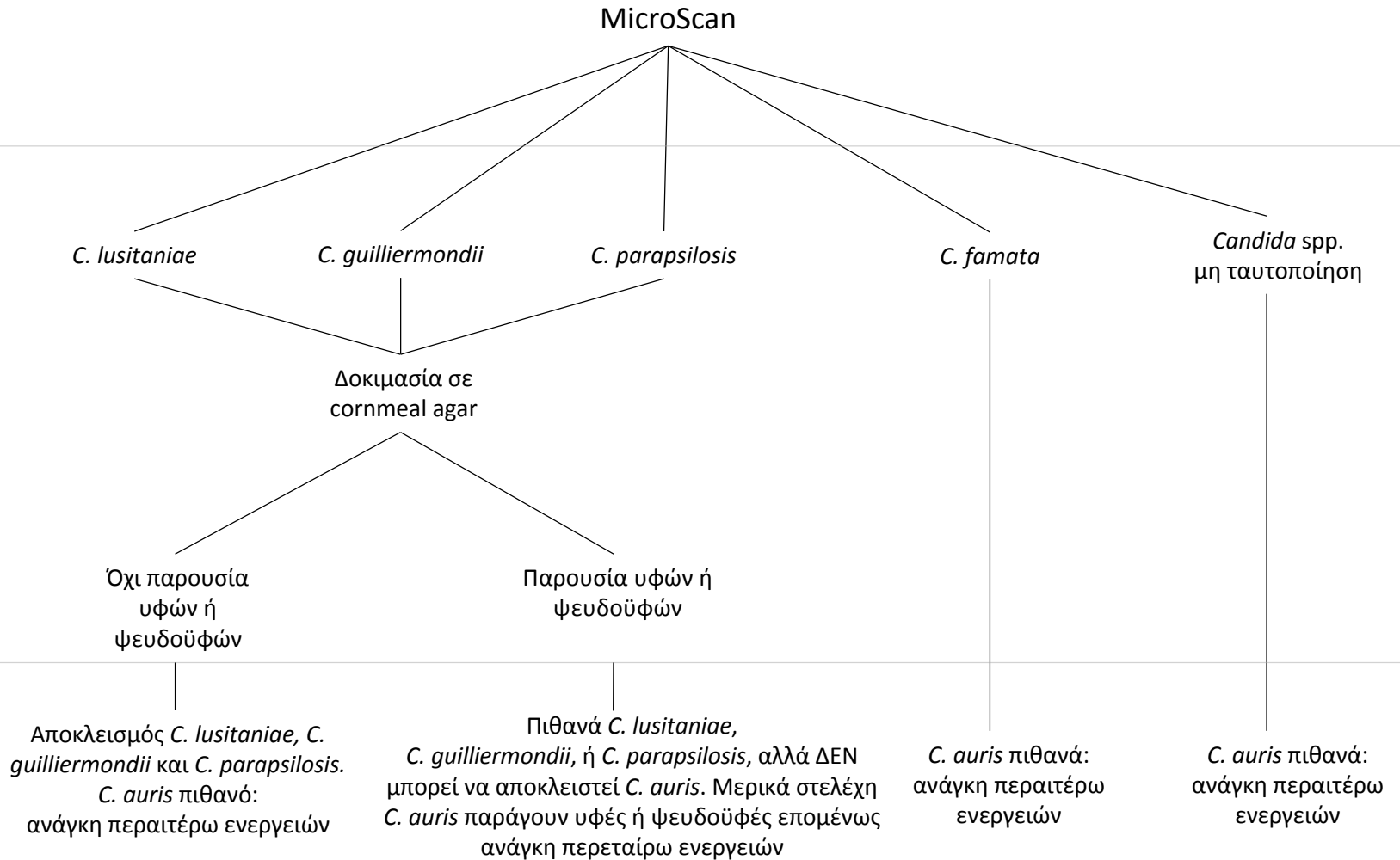
**Δεν είναι C. auris:**

Μη ανάγκη περαιτέρω ενεργειών.

## BD Phoenix

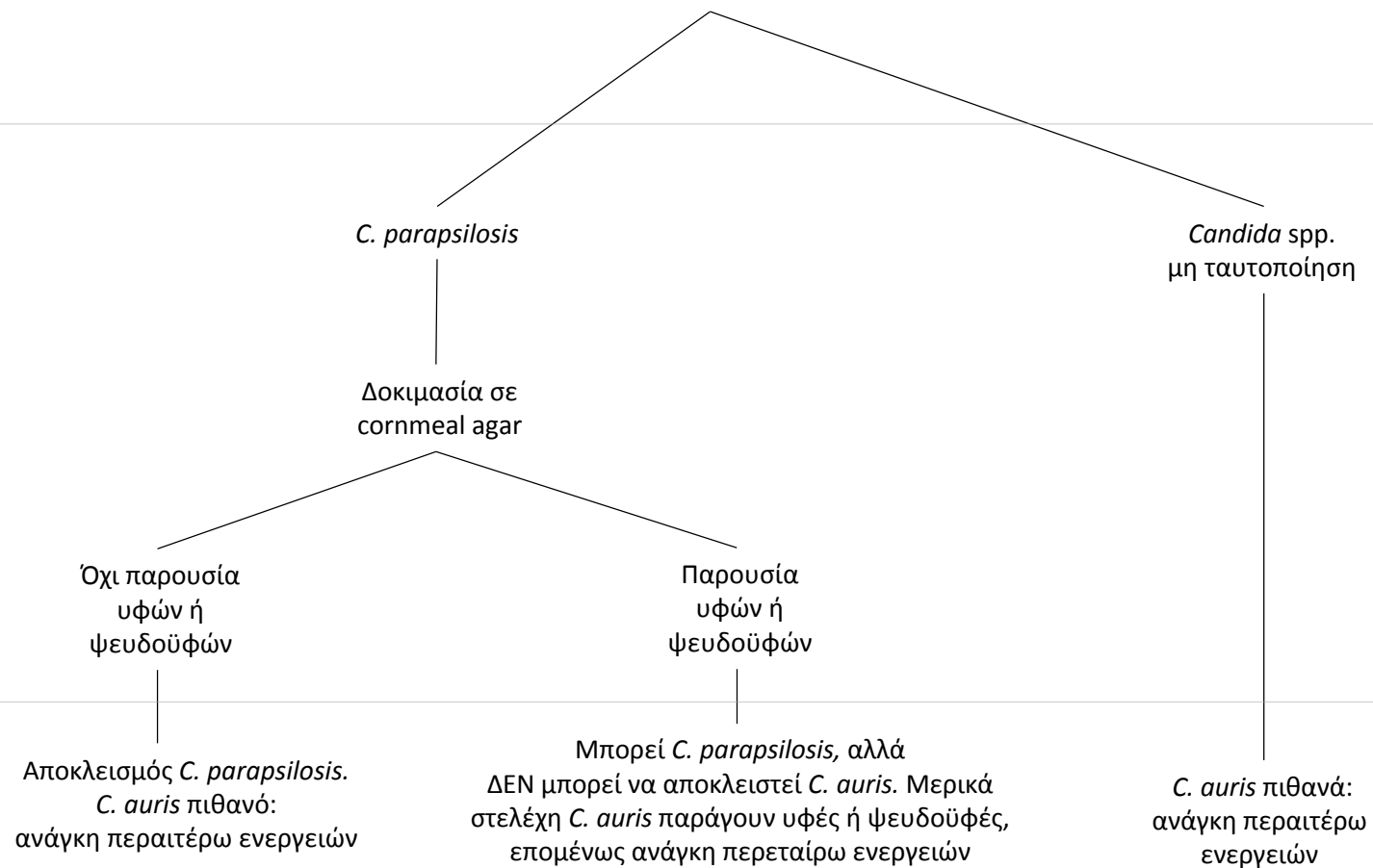
*C. catenulata**C. haemulonii**Candida* spp.  
μη ταυτοποίηση*C. auris* πιθανά:  
ανάγκη περαιτέρω  
ενεργειών*C. auris* πιθανά:  
ανάγκη περαιτέρω  
ενεργειών*C. auris* πιθανά:  
ανάγκη περαιτέρω  
ενεργειών***C. auris* πιθανό αποτέλεσμα:**

Ανάγκη περαιτέρω ενεργειών για επιβεβαίωση *C. auris*. Αποστολή στελέχους στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Αθηνών.  
Εφαρμογή μέτρων προφύλαξης επαφών, ενημέρωση ΕΟΔΥ.

***C. auris* πιθανό αποτέλεσμα:**

Ανάγκη περαιτέρω ενεργειών για επιβεβαίωση *C. auris*. Αποστολή στελέχους στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Αθηνών.  
Εφαρμογή μέτρων προφύλαξης επαφών, ενημέρωση ΕΟΔΥ.

## Rapid Yeast Plus (remel)

***C. auris* πιθανό αποτέλεσμα:**

Ανάγκη περαιτέρω ενεργειών για επιβεβαίωση *C. auris*. Αποστολή στελέχους στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Αθηνών. Εφαρμογή μέτρων προφύλαξης επαφών, ενημέρωση ΕΟΔΥ.